



# Nyhet: **NipSet®** connectorer

2007  
Information

## Till blodtrycksmonitorer & manschetter



- Vill du undvika connector kaos?



- Med **NipSet®** systemet kan du på ett enkelt sätt avskaffa connector kaos



- **NipSet®** systemet kan användas till alla blodtrycksmonitorer och manschetter med både enkel och dubbelslangar – se vänligast ytterligare information på baksidan



- **NipSet®**
- Användarvänlig
- Lätt att connecta – avger ljud
- Skapar en säker förbindelse

| Kat. nr.    | Beskrivning  |              |
|-------------|--|--------------|
| F001 NIPSET | <b>NipSet®</b> monitor connector grön med enkel slangestuds  | Box á 5 st.  |
| F002 NIPSET | <b>NipSet®</b> monitor connector grön med dubbel slangestuds | Box á 5 st.  |
| M003 NIPSET | <b>NipSet®</b> manschett connector blå med enkel slangestuds | Box á 20 st. |

## En genialisk lösning som måste ses och prövas!

**Bruksanvisning - se vänligen baksida → → →**



2007  
Information

# Bruksanvisning för NipSet®



NipSet® connector finns i 3 olika varianter



F001 NIPSET

Grön connector med enkelt slangestuds

Används till: Blodtrycks-monitorer med enkelt slang system



F002 NIPSET

Grön connector med dubbelt slangestuds

Används till: Blodtrycks-monitorer med dubbelt slang system



M003 NIPSET

Blå connector med enkelt slangestuds

Används till: Blodtrycks-manschetter med enkelt slang system

**Observera!**



M003 NIPSET

Blå connector med enkelt slangestuds

Kan också användas till: Blodtrycks-manschetter med dubbel slang

Vid detta tillfälle afbländer man den ena slangen på blodtrycksmanschetten med hjälp av t.ex en kateterpropp med passande slangestuds.

Om önskan finnes kan man korta av/klippa av slangen innan att kateterproppen sättes på.



**Koppling och isär tagande av connectorer**

Man kopplar connectorerna genom att "pressa/bryta ihop" i resp. ände

Man avskiljer connectorerna genom att "pressa/bryta isär" i resp. ände



**En säker förbindelse – med ljud!**

När connectorerna är samlade kan dessa inte "släppa" från varandra

Vid avskiljning och samling av connectorerna hör man ett "blop" ljud

**NipSet® connectorer är testade under minst 10.000 ggr användning – utan problem!**